

GENGIGEL®

FIRST AID

Peroralna tekočina

SL

Idealen izdelek za nanos na rane in med pooperacijsko fazo. Posebej oblikovan za zagotovitev enostavne, hitre in učinkovite uporabe. Hialuronska kislina z visoko molekulsko maso je še posebej skoncentrirana v zunanjih plasteh gingivalnega tkiva, kjer prispeva k zaščitni funkciji parodontalne vezi in njeni trdnosti. Njena prisotnost je nujna za vzdrževanje zdravega gingivalnega tkiva. Hialuronska kislina ima veliko ugodnih lastnosti, ki prispevajo k uspešnemu zobozdravstvenem zdravljenju in ustni higieni. Posebna lastnost hialuronske kisline je, da lahko absorbira 50-krat večjo količino vode od lastne suhe mase. Ta lastnost, skupaj z njeno molekulsko zgradbo, omogoča v vodi raztopljeni hialuronski kislino, da deluje kot pregrada pred vdorom mikroorganizmov in drugih toksinov, ki po vsej verjetnosti prispevajo k etiologiji parodontalnih bolezni, saj deluje kot zelo učinkovita naravna pregrada. Gengigel® **first aid** pomaga zmanjšati bolečino, spodbuja rekonstrukcijo gingivalnega tkiva po travmatičnih posegih kot so operacija, vsadki, puljenje zob, luščenje zobnih korenin itd. Gengigel® **first aid** spodbuja absorpcijo vode ter tako zmanjšuje oteklino in blaži vnetje. Gengigel® **first aid** • Vsebuje biotehnološko izdelano, visokokakovostno in zelo čisto hialuronsko kislino v obliki natrijeve soli z visoko molekulsko maso, ki ni živalskega izvora. • Ima dolgotrajno lokalno delovanje. • Zaradi posebne formulacije se oprime sluznice. • Uporabljati ga smejo vsi ljudje brez omejitev, tudi otroci, nosečnice, starejši ljudje in sladkorni bolniki. **Indikacije** Gengigel® **first aid** je posebej namenjen zaščiti sluznice v primeru: • globokih ran na dlesnih • vnetih in/ali bolečih predelov po poškodbi, kirurških ali parodontalnih posegih, puljenju zob ali subgingivalnem luščenju korenin. **Navodila za uporabo** Takoj po zobnem posegu spirajte ustno votlino s 5 ml izdelka (uporabite odmerni lonček) 1–2 minuti. Postopek ponovite po pravilni ustni higieni 2–4 x na dan, razen če vam zobozdravnik svetuje drugače. Tekočina je pripravljena za uporabo; ne razredčujte. **Pakiranje** Gengigel® **first aid** peroralna tekočina, 50 ml steklenička s priloženim odmernim lončkom CE 0373. **Kontraindikacije:** Uporaba izdelka Gengigel® **first aid** je kontraindicirana pri preobčutljivosti na katerokoli od sestavin. **Previdnostni ukrepi in opozorila:** Izdelka ne uporabljajte, če je vidno poškodovan. Shranjujte pri sobni temperaturi, med 5 °C in 40 °C; izdelek zaščitite pred neposrednimi viri toplote. Ne uporabljajte po pretečenem roku uporabe. Preden stekleničko po uporabi zaprete, odstranite vse ostanke izdelka. Samo za osebno uporabo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če simptomi vztrajajo, se posvetujte z zobozdravnikom.

Composition: / Zusammensetzung: / Compoziție / Σύνθεση / Összetétel /
Sestava / Состав / İçerik / التركيب

Principal ingredient: / Principal constituant: / Hauptbestandteil: / Principalul ingredient: /
Κύριο συστατικό: / Fő összetevő: / Glavna sestavina: / Основная составляющая: / Ana İçerik: /
المكون الرئيسي: ■ Sodium Hyaluronate

Other ingredients: / Autres composants: / Andere Inhaltsstoffe: / Alte componente: /
Άλλα συστατικά: / Egyéb összetevők: / Ostale sestavine: / Други съставки: / Diğer içerikler: /
مكونات أخرى: ■ Aqua, Peg-400, Xylitol, Propylene glycol, Peg-40 Hydrogenated castor oil,
Cellulose gum, PVM/MA Copolymer, Polysorbate 20, Sodium benzoate, Dichlorobenzyl alcohol,
Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Sodium phosphate, Trisodium phosphate, Sodium
lactate, Disodium EDTA, Glycerophosphocholine, Aroma, Sodium saccharin, Acid Red 33 (CI 17200).

It may contain / Peut contenir / Präparat kann / Poate conține / Μπορεί να περιέχει /
It may contain / It may contain / Може да съдържа / içerebilir / قد يحتوي على
■ Sodium hydroxyde, Lactic acid



CE
0051



RICERFARMA s.r.l.
Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Made in EU

MC200327IN/EB
v1
Release March 2021

measuring cup	cap	bottle	IFU	box
 PE-HD	 PE-HD	 PET	 PAP	 PAP
 PP	 PP			
plastic			paper	

Medical Device Class II b
INTERNATIONAL PATENT